

| رقم المرجع    | البيان               |   |         |   |   |
|---------------|----------------------|---|---------|---|---|
| ١٠٠,٢٠<br>... | إيكو ١٠٠             | ١ | ١٠٠ كجم | أ | ج |
| ١٠٠,٢٢<br>... | إيكو ١٢٠             | ٤ | ١٢٠ كجم | أ | ج |
| ...١٠١        | ماجيك توين           | ١ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١٠٢        | ماجيك توين           | ٢ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١٠٣        | ماجيك توين           | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١٠٤        | ماجيك توين طول إضافي | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١٠٥        | ماجيك سوفت           | ٢ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ٠٤...١٠٥      | ماجيك سوفت طول إضافي | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ١٠٦,١٠        | بيغ ١٥٠              | - | ١٥٠ كجم | ب | ج |
| ١٠٦,٣٠        | بيغ ١٣٠ تشريحي       | - | ١٣٠ كجم | ب | ج |
| ...١٠٧        | ماجيك سوفت تشريحي    | ٢ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١٠٩        | كومي سوفت            | ٢ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١١٠        | كومفورت سوفت         | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١١٢        | كومفورت              | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١١٥        | كومي                 | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١١٦        | سيف-إن               | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ٢٠...١١٦      | سيف-إن طول إضافي     | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١١٧        | سيف-إن سوفت          | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١١٨        | سيف-إن تشريحي سوفت   | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١١٩        | سيف-إن تشريحي        | ٣ | ١٣٠ كجم | أ | ج |
| ...١٢٠        | لايت لاين            | ٣ | ١٠٠ كجم | أ | ج |
| ...١٢٢        | فن كيدز              | ٣ | ١٠٠ كجم | أ | ج |
| ١٠...١٢٢      | سيف-إن كيدز          | ٣ | ١٠٠ كجم | أ | ج |

أ= قابل لتعديل الارتفاع / ب= أنبوب مستمر، قابل

للتقصير

ج= للاستخدام الداخلي والخارجي

١= مشبك قياسي / ٢= ضغط كبسي / ٣= مشبك

كبسي / ٤= ضغط قياسي

دواعي الاستعمال

## تعليمات الاستخدام

### عكازات الساعد



### ١. وصف المنتج

#### ١,١ مقدمة

- المنتج الموضح في هذا الدليل هو جهاز طبي مصنف ضمن فئة المخاطر الأولى وفقاً للائحة الاتحاد الأوروبي للأجهزة الطبية رقم ٧٤٥/٢٠١٧.

- يتضمن دليل المستخدم هذا معلومات حول التشغيل الأولي الآمن والسليم، وطرق استخدام هذا المنتج وصيانته والعناية به. يجب قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل البدء في استخدام الجهاز، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والعمل بموجبها.

### ٢. المميزات

#### ٢,١ الغرض من الاستخدام

- يُستخدم هذا الجهاز لتخفيف الحمل عن الأطراف السفلية، مما يساعد المستخدم على استعادة القدرة على التنقل. ويتطلب الاستخدام الآمن للجهاز تمتع المستخدم بقوة عضلية كافية في الجزء العلوي من الجسم. قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات حسية من استخدام هذا المنتج، كما أن استخدامه لا يتطلب أي مؤهلات تعليمية خاصة من المستخدم.

المواصفات:

العدوى الألماني، ومراعاة الملصقات التعريفية  
الموضحة على مواد التغليف والعمل بموجبها.

### ٣. الرموز ولوحات البيانات



يُحظر تماماً إزالة لوحة البيانات!

يلزم تقديم اسم المنتج، والرقم  
التسلسلي/رقم الدفعة، وسنة الصنع عند  
طلب قطع الغيار أو متابعة إجراءات



الشكاوى.

| الرمز | المعنى   | الرمز | المعنى   |
|-------|--|-------|--|
|       | يُرجى<br>قراءة<br>دليل<br>المستخدم<br>!                              |       | سنة صنع<br>سنة<br>تصنيع<br>الجهاز                                  |
|       | الرقم<br>التسلسلي  |       | معلومات<br>هامية   |
|       | رقم المنتج   |       | أقصى وزن<br>للمستخدم<br>بالكيلوجرام<br>م                           |
|       | مخصص<br>للاستخدام<br>الداخلي<br>فقط                                  |       | صالح<br>للاستخدام<br>الداخلي<br>والخارجي                           |
|       | الشركة<br>المصنعة  |       | اللغة  |
|       | يُرجى<br>قراءة<br>دليل<br>المستخدم<br>!                              |       | لا يجوز<br>التخلص<br>من المنتج<br>مع<br>النفايات<br>المزلية.       |
|       | المنتج مطابق للائحة الاتحاد الأوروبي للأجهزة<br>الطبية رقم ٢٠١٧/٧٤٥. |       | المنتج مطابق للوائح الأجهزة الطبية في المملكة<br>المتحدة لعام ٢٠٠٢ |
|       | يجب حماية المنتج من أشعة الشمس مباشرة!                               |       |  |
|       | يُحفظ بعيداً عن الأمطار!   |       |  |
|       | الحد الأقصى لدرجة الحرارة  |       |  |

يُستخدم في حالات العجز الجزئي عن تحمل  
الوزن في الأطراف السفلية، سواء كان ذلك بصفة  
مؤقتة أو دائمة. تشمل مسببات الاستخدام:  
حالات ما بعد الحوادث والإصابات، والتعافي من  
العمليات الجراحية، والأمراض التنكسية،  
والالتهابية، والعصبية، والباطنية، والأورام،  
بالإضافة إلى العيوب الخلقية، والتشوّهات،  
والاضطرابات الوظيفية.

المتطلبات الأساسية للاستخدام: توفر قوة  
عضلية جيدة في الأطراف العلوية، وقدرة كافية  
على التنسيق الحركي.

### مواعيد الاستعمال

وجود قصور وظيفي في الأطراف العلوية يمنع  
الاستخدام الآمن للأدوات المساعدة على المشي.  
كما قد تُعد اضطرابات التوازن والاضطرابات  
الحسية العامة من العوائق التي تمنع الاستخدام؛  
وفي هذه الحالات، يجب تقييم الحالة من قبل  
أخصائي مؤهل.

### ٢,٢. الاستخدام

نطاق درجة الحرارة: من ١٠- إلى +٣٥ درجة مئوية.  
يجب تجنب تعريض المنتج المباشر لمصادر الحرارة  
المشعة. الرطوبة النسبية: من ٤٠% إلى ٨٥%. في  
حال تجاوز هذه المعدلات، يُسمح باستخدام  
المنتج لفترات وجيزة فقط.

يُحظر استخدام المنتج في حمامات السباحة أو  
غرف الساونا؛ لتجنب حدوث تغيرات في لون  
الأسطح أو انخفاض في كفاءة المتانة الميكانيكية  
للمنتج.

### ٢,٣. التخزين والنقل

نطاق درجة الحرارة: من ٥+ إلى ٢٥+ درجة مئوية.  
يجب تجنب التعرض المباشر للحرارة المشعة.  
يُخزن المنتج في أماكن جافة بحيث لا تتجاوز نسبة  
الرطوبة ٦٥%.

### ٢,٤. التخلص من المنتج

يجب التخلص من الأجهزة المستعملة ومواد  
التغليف وإعادة تدويرها وفقاً للوائح والقوانين  
المحلية المعمول بها. يُرجى التواصل مع شركات  
التخلص من النفايات المختصة للحصول على  
التفاصيل. كما يجب الالتزام بقانون الحماية من

|  |  |
|--|--|
| وجود أي أعطال أو تلف مهما كان نوعه. كما يجب فحص السدادات المطاطية بصفة دورية للتأكد من سلامتها وعدم تأكلها، مع ضرورة استبدالها عند الحاجة.   |  |
| يجب وضع الأداة المساعدة على المشي على الأرض بوضعية عمودية قدر الإمكان أثناء الحركة؛ لذا احذر من وضعها بعيداً عن الجسم أو دفعها للأمام بشكل مفرط في اتجاه المشي. أمسك المقبض بكامل قبضة اليد وبإحكام. ويُنصح، كلما أمكن ذلك، بوجود مرافق لتقديم الدعم وحمايتك في حال التعرض لخطر السقوط.  |  |
| يُحظر تمامًا إساءة استخدام الأداة المساعدة على المشي تحت أي ظرف من الظروف؛ لذا يجب استخدامها فقط لدعم القدرة على المشي، وليس للمساعدة في الوقوف، أو لرفع أو تحريك الأثاث أو أي أغراض أخرى. كما يجب عدم تعليق أي أشياء (مثل الحقائب أو الأكياس وغيرها) بالأداة المساعدة على المشي.  |  |
| بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام: يجب فحص أداة المساعدة على المشي من جانب فنيين مؤهلين أو وكيل متخصص. لا تقم بإجراء أي تعديلات ميكانيكية غير مصرح بها (مسؤولية المنتج!). لا تعرض أداة المساعدة على المشي لأشعة الشمس لفترة طويلة (بجوار النافذة، بالقرب من المدفأة، أو في السيارة)، إذ يمكن أن تؤدي الحرارة إلى تغييرات في خواص المواد وتقليل متانتها.  |  |
| <b>تنبيه، خطر الانزلاق:</b> لا تمش مطلقًا باستخدام الأداة المساعدة على المشي على أرض مغطاة بالثلوج أو الجليد دون تركيب القطعة المضادة للانزلاق (مخلب الجليد). توحَّ الحذر عند المشي على البلاط المبلل، أو الأرضيات الرطبة، أو عند عبور السجاد غير المثبت. لا تنظف المقابض أو السدادات المطاطية بمواد تحتوي على الزيوت. احذر من الأسطح غير المستوية، والحفر، والترية الرخوة؛ حيث يمكن أن تنزلق الأداة فجأة أو تغرز في الأرض بشكل غير متوقع. |  |
| ثمة خطر للتعرض للإصابة عند تجاوز درجات حرارة الأسطح ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ فهرنهايت). يجب عدم تعريض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة بشكل مفرط (مثل أشعة الشمس المباشرة، أو  |  |

|  |  |
|--|--|
| حد الرطوبة المسموح به  |  |
| تنبيه! يجب الالتزام بتعليمات السلامة   |  |
| المعرف الفريد للجهاز (البيانات: رقم السلعة التجاري العالمي / رقم التشغيل) (الرقم التسلسلي / سنة الصنع) |  |
| ملصق الجهاز الطبي هذا المنتج عبارة عن جهاز طبي.  |  |
| بيان المنتج / الاسم الرسمي   |  |

#### ٤. الضمان

- تمنح الشركة المصنعة ضمانًا لمدة ١٢ شهرًا لهذا المنتج. يُعد الالتزام بالأحكام والشروط العامة المعلنة على الموقع الإلكتروني ([www.rebotec.de/agbs](http://www.rebotec.de/agbs))، بالإضافة إلى الاستخدام المقصود للمنتج، شرطًا أساسيًا لسريان الضمان. وتُطبق الأحكام القانونية السارية المتعلقة بالضمان.
- أي تعديلات غير مصرح بها على هذا المنتج ستؤدي إلى بطلان مطابقة المنتج للمواصفات وإلغاء الضمان.
- ٤.١. الشكاوى
  - يُرجى التواصل معنا قبل إعادة أي منتج. ولتقليل أضرار النقل إلى أدنى حد، نوصي باستخدام عبوة التغليف الأصلية إن أمكن.
  - يجب الالتزام بقانون الحماية من العدوى الألماني.
    - تأكد من خلو المنتج من أي مخاطر لنقل العدوى عبر المنتج عند إعادته. ويجب إرفاق إقرار بالخلو من الملوثات بالمنتج قبل الشحن. قد يتم فرض تكاليف إضافية على المرتجعات التي لا تحمل ملصقًا يثبت سلامتها من العدوى.

#### ٥. ملاحظات السلامة

- يرجى الالتزام بتعليمات السلامة التالية:
- لتجنب المخاطر أو الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، يجب قراءة دليل الاستخدام بالكامل قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى. يتعين فحص المنتج قبل كل استخدام للتأكد من خلوه من أي أضرار مرئية؛ حيث يُحظر استخدامه في حال

- يجب ضبط المنتج ليتناسب مع حجم جسمك من قبل الأخصائي التابع لك. يتم ضبط الارتفاع باستخدام أنبوب




ألمونيوم تلسكوبي مزود بمشبك (٢) أو

- زر ضغط (١). إذا كان المنتج مزوداً بصامولة ربط لولبية، فيجب فكها عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة قبل البدء في الضبط. ثم إعادة إحكام ربطها جيداً بعد الانتهاء؛ أما المنتجات ذات الأنابيب المستمر فيتعين قصها لتصل إلى الحجم المطلوب.

- تتبع آلية ضبط مسند الذراع نفس مبدأ تعديل الارتفاع الخاص بزر الضغط.

- ٨,٢. ضبط ارتفاع مقبض الأدوات المساعدة على المشي (باستثناء طراز إيكو ١٢٠)

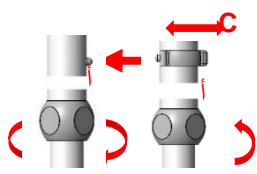

يتم ضبط الارتفاع باستخدام

أنبوب الألمونيوم تلسكوبي مزود بمشبك تثبيت أو زر ضغط.


- قم بفك حلقة التثبيت (أ) عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة.
- اضغط على زر الضغط (ب) ليدخل في الفتحة، أو اسحب المشبك (ج) للخارج (حسب نوع الموديل).

- حرك أنبوب الألمونيوم للوصول إلى الوضعية المطلوبة.

- تأكد من تعشيق زر الضغط في الفتحة المخصصة له، أو إعادة تركيب المشبك في موضعه بإحكام.

- أحكم ربط حلقة التثبيت (أ) بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة؛ حيث يساعد إحكام ربطها على تقليل الضوضاء الناتجة أثناء الاستخدام. أعد إحكام الربط مرة أخرى بعد فترة قصيرة من الاستخدام إذا لزم الأمر.

- ٨,٣. ضبط ارتفاع مسند الساعد (فقط للموديلات ذات المسند القابل للضبط)

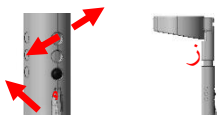

اضغط على مسمار

أجهزة التدفئة، أو الماء الساخن). اترك المنتج ليبرد تماماً قبل البدء في استخدامه.

- عند استخدام المنتج من قبل أشخاص ذوي بشرة فاقدة للإحساس (مثل عدم الشعور بالحرارة أو وجود تضرر في الجلد)، يجب على طاقم التمريض أو الرعاية إجراء فحص للحرارة (عن طريق لمس المنتج بظهر اليد مثلاً) قبل الاستخدام.

## ٦. الإبلاغ عن الحوادث

- يجب إبلاغ الشركة المصنعة والجهات المختصة فوراً عن أي حوادث خطيرة تقع فيما يتعلق باستخدام المنتج
- يُرجى استخدام وظائف الإبلاغ والنماذج المتاحة على الموقع.
- البريد الإلكتروني الخاص بالشركة المصنعة: [pms@rebotec.de](mailto:pms@rebotec.de)


## ٧. إعادة الاستخدام والعمر الافتراضي

- المنتج صالح لإعادة الاستخدام؛ ويتوقف عدد مرات استخدامه مجدداً على طبيعة وكثافة الاستهلاك. قبل إعادة الاستخدام، يجب إعادة تجهيز المنتج وفحص سلامته الفنية والتشغيلية، وصيانتها إذا لزم الأمر. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في تعليمات إعادة التجهيز رقم (١٥٤, ١٢, ٢٠). كما يمكن تحميل تعليمات إعادة التجهيز ودليل المستخدم هذا من الموقع الإلكتروني: [www.rebotec.de/downloads](http://www.rebotec.de/downloads).
- في حال استخدام المنتج وفقاً للغرض المخصص له، فإن عمره الافتراضي يبلغ عامين. وتجدر الإشارة إلى أن العمر الافتراضي الفعلي قد يتفاوت زيادةً أو نقصاناً بناءً على معدلات الاستخدام والحالة العامة للمنتج.

## ٨. التجهيز للاستخدام

- خضع هذا المنتج للفحص في المصنع لضمان اكتمال أجزائه وخلوه التام من العيوب. لذا، يُرجى فحص المنتج فور استلامه للتأكد من عدم تعرضه لأي أضرار أثناء الشحن، والتحقق من مطابقة كافة المحتويات لقائمة التجهيزات الموردة.
- ٨,١. الضبط بما يتناسب مع حجم الجسم

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات ناتجة عن التطوير التقني مقارنة بالإصدار الموضح في تعليمات الاستخدام هذه .

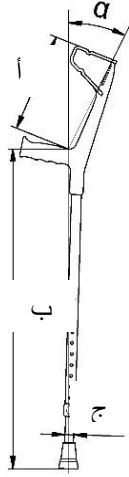

| رقم المرجع | أ/ ملم  | ب/ ملم   | ج/ ملم | الزاوية |
|------------|---------|----------|--------|---------|
| ...١٠٠,٢٠  | ٢١٥     | ٩٦٠-٧٣٥  | ١٧     | ٥٢٢     |
| ...١٠٠,٢٢  | ٢١٥     | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٢     |
| ...١٠١     | ٢٢٥     | ٩٥٠-٧٢٥  | ١٩     | ٥٢٥     |
| ...١٠٢     | ٢٢٥     | ٩٥٠-٧٢٥  | ١٩     | ٥٢٥     |
| ...١٠٣     | ٢٢٥     | ٩٥٠-٧٢٥  | ١٩     | ٥٢٥     |
| ...١٠٤     | ٢٢٥     | ١٠٥٠-٨٢٥ | ١٩     | ٥٢٥     |
| ...١٠٥     | ٢٢٥     | ٩٥٥-٧٣٠  | ١٩     | ٥٢٥     |
| ...٤,١٠٥   | ٢٢٥     | ١٠٥٥-٨٣٠ | ١٩     | ٥٢٥     |
| ١٠٦,١٠     | ٢٥٠-٢٢٥ | حتى ١٠٧٥ | ٢٢     | ٥٢٠     |
| ١٠٦,٣٠     | ٢٥٠-٢٢٥ | حتى ١٠٨٠ | ١٩     | ٥٢٧     |
| ...١٠٧     | ٢٢٥     | ٩٥٥-٧٣٠  | ١٩     | ٥٢٥     |
| ...١٠٩     | ٢٥٠-٢٢٥ | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٣     |
| ...١١٠     | ٢٥٠-٢٢٥ | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٣     |
| ...١١٢     | ٢٥٠-٢٢٥ | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٣     |
| ...١١٥     | ٢٥٠-٢٢٥ | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٣     |
| ...١١٦     | ٢٥٠-٢٢٥ | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٣     |
| ٢٠...١١٦   | ٢٥٠-٢٢٥ | ١٠٧٠-٨٤٥ | ١٩     | ٥٢٣     |
| ...١١٧     | ٢٥٠-٢٢٥ | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٣     |
| ...١١٨     | ٢٥٠-٢٢٥ | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٣     |
| ...١١٩     | ٢٥٠-٢٢٥ | ٩٧٠-٧٤٥  | ١٩     | ٥٢٣     |

الزنبك (و) للدخول لتحريره من الفتحة.

- حرك مسند الساعد (ز) صعوداً أو نزولاً للوصول إلى الوضعية المطلوبة.
- تأكد من تعشيق مسمار الزنبك (و) مرة أخرى في الفتحة المخصصة له بإحكام.

٨,٤. نظام الإيقاف (فقط للموديلات المزودة بهذا النظام)

- قم بتعشيق الأجزاء معاً ببساطة، وسوف يستقر العكاز قائماً!
- تحسين وضعية ركن (إيقاف) العكاز عند عدم الاستخدام.
- وداعاً لسقوط العكاز المتكرر على الأرض.

٨,٥. ضبط المقبض القابل للدوران (فقط لموديلي "كومفورت" و"سيف-إن أباتوم")

- قم بفك الصامولة الأنبوبية (ح) الموجودة داخل المقبض باستخدام مفتاح ربط (مقاس ٦ ملم).

- أدر المقبض للوصول إلى الوضعية المطلوبة.
- أعد إحكام ربط الصامولة الأنبوبية (ح) جيداً. بالنسبة للموديلات المزودة بمقبض لين، تحقق من عزم إحكام ربط حلقة التثبيت. إذا لزم الأمر، أعد إحكام ربط حلقة التثبيت باستخدام مفتاح ألن (مقاس ٦ ملم).



٩. معلومات المنتج

|           |    |         |        |     |
|-----------|----|---------|--------|-----|
| ١٢٠...١٢٠ | ١٧ | ٩٦-٧٣٥  | ٢١-١٦٠ | ٥٢٣ |
| ١٢٢...١٢٢ | ١٧ | ٧٢٥-٥٠٠ | ٢١-١٦٠ | ٥٢٣ |

## ١.٠. التنظيف والتطهير

### ١.٠.١ عام

- استخدم مواد تنظيف وتطهير معتدلة ومتوفرة تجاريًا للعناية بالمنتج. بعد التنظيف، امسح المنتج بماء نظيف ثم جففه جيداً بقطعة قماش. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو مواد التنظيف التي تحتوي على مذيبات قوية (يجب مراعاة تعليمات المنظف المستخدم!) ولا تستخدم أدوات تنظيف خشنة؛ لأن ذلك قد يتلف الأسطح أو يؤدي إلى تكون ترسبات.
- المنتج غير مخصص للتنظيف والتطهير الآلي. يجب الالتزام بتعليمات إعادة التجهيز رقم (١٥٤، ١٢، ٠٢).
- يجب مراعاة تدابير الحماية من العدوى؛ لذا قم بتطهير المنتج جيداً قبل إعادة استخدامه.
- يحظر خلط مواد تنظيف وتطهير مختلفة مع بعضها البعض.

### ١.٠.٢ التنظيف

- يُحظر استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مذيبات قوية (مثل الأحماض، أو البيزين، أو المخففات، أو الكلور) أو استخدام أدوات تنظيف خشنة. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الأسطح البلاستيكية وأنايب الألومنيوم، وقد تتكون ترسبات على المواد أو يحدث تآكل، مما يسبب عدم استقرار المنتج ويقلل من عمره الافتراضي.

### ١.٠.٣ التطهير

- المنتج غير مخصص للتعقيم بالبخار أو بالهواء الساخن. يرجى مراعاة درجات حرارة التشغيل المذكورة في القسم (٢، ٢).
- استخدم فقط مطهرات الأسطح المختبرة والمعتمدة من قبل معهد روبرت كوخ.
- يُسمح باستخدام المواد المطهرة التي تعتمد في تركيبها على الكحول أو (الفورم) ألدهيد.
- يجب مراعاة توافق المواد الكيميائية المحدد من قبل الشركات المصنعة للمطهرات. يتكون المنتج من الأجزاء والمواد التالية:
- البولي بروبيلين: مقابض اليد للعكازات.

- البولي أميد: مساند الساعد، والمشابك.
- البولي يوريثان: أجزاء التنجيد، والسدادات المطاطية، والمقابض.
- الألومنيوم: الأنايب.
- فولاذ مقاوم للصدأ: المسامير، والوردات، والصواميل.
- البولي إيثيلين: لوحة البيانات.

## ١.١ الصيانة


- يجب عرض الأداة المساعدة على المشي على الوكيل المتخصص لفحصها مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل. كما يجب استبدال السدادات المطاطية المتآكلة (باعتبارها أجزاء استهلاكية) على الفور.

### انتبه لقطر

السدادة (راجع

القسم ٩): قم


بسحب السدادة

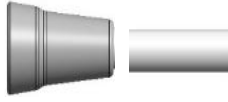

- المطاطية القديمة من طرف الأنبوب، ثم اضغط السدادة الجديدة للداخل حتى النهاية، وتأكد من ثباتها في مكانها بإحكام.

## ١.٢ قطع الغيار والملحقات
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
| رقم القطعة | البيان                    |
|------------|---------------------------|
| ١٠٠٠٢٠٠    | سدادة مطاطية مقاس ١٧ ملم  |
| ٠٠٠٢٠٠     | سدادة مطاطية مقاس ١٩ ملم  |
| ٢٠٠٢٠٠     | سدادة مطاطية مقاس ٢٢ ملم  |
| ٠٠٠٢٠١     | مشبك ضبط مقاس ٢٢ ملم      |
| ٢٠٠٢٠١     | مشبك ضبط مقاس ٢٠ ملم      |
| ٢٥١٠٠٠٠    | زر ضغط بناض               |
| ١٦٠٠٢٠٠    | وسادة مسند ساعد، قياسية   |
| ١٦٠٠٢٠٠    | وسادة مسند ساعد، كبيرة    |
| ١٦٠٠١٠٠    | وسادة مقبض يد، صغيرة جداً |
| ١٦٠٠١٠٠    | وسادة مقبض يد، قياسية     |
| ١٦٠٠١٠٠    | وسادة مقبض يد، كبيرة      |
| ١٦٠٠١٠٠    | وسادة مقبض يد، تشريحية    |



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| تعليمات الاستخدام     | ٠٢,٠١,٠٠<br>١ |
| تعليمات إعادة التجهيز | ٠٢,١٢,١٥<br>٤ |
| تعليمات الصيانة       | ٠٢,١١,٢١<br>٣ |

**شركة ريبوتيك®** مستلزمات إعادة التأهيل جي إم بي اتش

آرتلاند شتراسه ٥٧-٥٩، كواكنبروك ٤٩٦١٠، ألمانيا

هاتف: +٤٩ (٠) ٤٣١/٥٤١٦-٩٤١٦

فاكس: +٤٩ (٠) ٤٣١/٥٤١٦-٩٤١٦

الموقع الإلكتروني: [www.rebotec.de](http://www.rebotec.de)

البريد الإلكتروني: [info@rebotec.de](mailto:info@rebotec.de)