




BA-Nr.: 01.10.109/2016-012



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon : 05431/9416-0
Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
E-Mail: info@rebotec.de

Bedienungsanleitung

Umsetzgurt

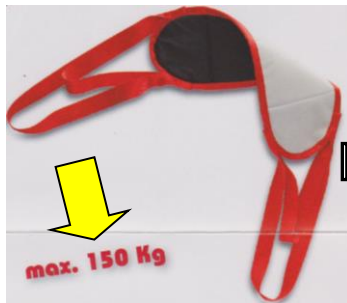

Größe M
Art.-Nr.: 320.80

Größe L
Art.-Nr.: 320.81

1. Verwendungszweck

Der Umsetzgurt findet Verwendung, wenn eine Pflegekraft/Helfer sicher zu fassen muss, um den Benutzer beim Aufstehen, Hinsetzen od. Hinlegen zu unterstützen. Der Stützgurt erleichtert das Benutzen von Bett, Toilettenstuhl, Rollstuhl usw., wie auch als Hilfe beim Gehtraining.

Die Anwendung ist nur für den häuslichen oder stationären Bereich geeignet. **Der Umsetzgurt ist nicht zum Anheben von Lasten und Transportieren geeignet.**

Der Umsetzgurt ist pflegeleicht, strapazierfähig und wasserabweisend (Außenmaterial: Polyester, Innenmaterial: PU-beschichtetes, rutschhemmendes Gewebe). Die Pflegehinweise und Maße entnehmen Sie dem Beipackzettel der Verpackung des Umsetzgurtes.

2. Garantie

Auf den Umsetzgurt geben wir eine Garantie von **2 Jahren** auf Material bzw. Produktionsfehler. Voraussetzung für die Garantie ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes, sowie die regelmäßige Durchführung von Wartungen.

Die Nichtbeachtung der Anleitungen, unsachgemäße Wartung, eigenmächtig durchgeführte Änderungen am Produkt, ohne die Genehmigung des Herstellers, führen zum Verlust der Garantie.

Das Auslieferdatum auf dem REBOTEC-Lieferschein gilt als Garantiebeginn.

3. Entsorgung

Das Produkt kann in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

4. Vor Anwendung

Das Produkt wurde im Werk auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit geprüft.

Bitte prüfen Sie das Produkt nach Erhalt auf eventuelle, während des Transportes aufgetretene Schäden und auf Vollständigkeit des Lieferumfangs (1 Stützgurt und 3 Beipackzettel).


5. Anwendung

Den Umsetzgurt um die Schulter, Taille, Hüfte, Beine (je nach Anwendungssituation) des Benutzers legen. Der Umsetzgurt hat eine breite Kontaktfläche und beidseitig 2 Griffschlaufen (lang/kurz) und bietet somit sichern Halt in allen Richtungen. Für die Anwendung verwenden Sie auch den beiliegenden Beipackzettel.

6. Sicherheitshinweise bei Benutzung

- Überprüfen Sie den Umsetzgurt regelmäßig vor dem Gebrauch und nach jedem Waschen.
- Die Anwendung und Handhabung des Umsetzgurtes sollte nur durch geschultes Pflegepersonal/Helfer erfolgen.
- Verwenden Sie niemals einen defekten Umsetzgurt. Zeigen sich Anzeichen von Verschleiß oder Rissen ist der Umsetzgurt zu entsorgen.
- Überprüfen Sie regelmäßig ob keine Schäden an Nähten oder Stoff aufgetreten sind.
- Nehmen Sie keine eigenhändigen Reparaturen an dem Umsetzgurt vor.
- Vor Anwendung des Umsetzgurtes, um den Benutzer in stehende Position zu bringen, muss das Pflegepersonal/Helfer sich vom Zustand des Benutzers überzeugen.
- Lassen Sie den Umsetzgurt nicht auf dem Boden liegen und legen keine Gegenstände darauf.

Größen & Maße:
320.80 / Größe M
320.81 / Größe L

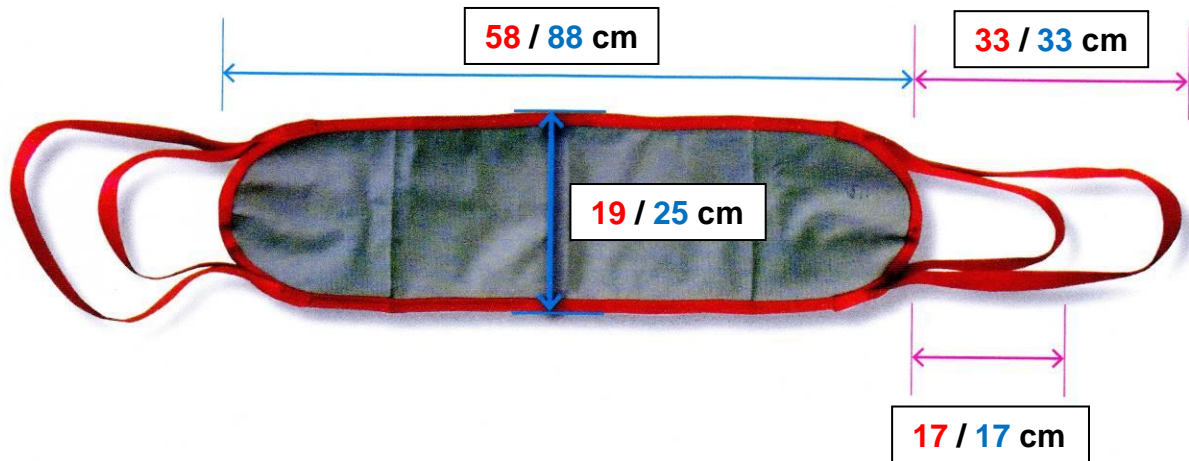

Handhabung:

