



Montageanleitung

MA-Nr.: 01.10.123/2016-12



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon: 05431/9416-0
Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
E-mail: info@rebotec.de

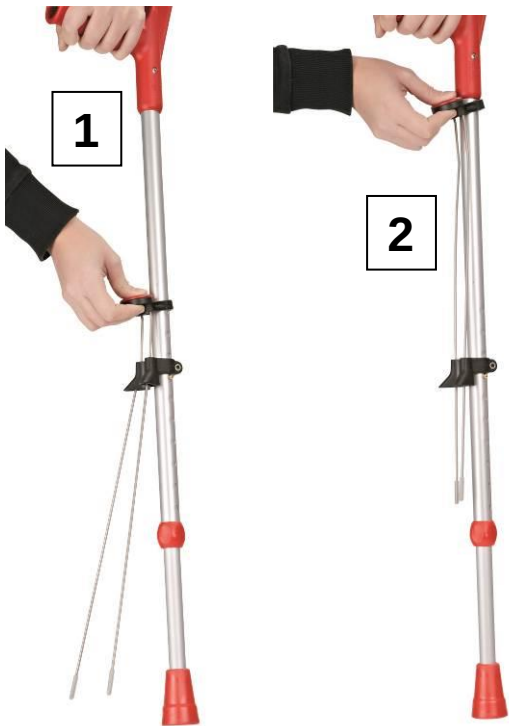
„TriPod“ / Gehstützenständer für UAG* Artikel-Nr.: 169.10 / 1 Stück



Anwendungshinweise!
Nur für UAG mit Quetschverschraubung und Druckkopfsystem. Nicht für UAG-Überlang.

* UAG =Unterarmgehstütze

Abbildungen	Montage
	Die Quetschverschraubung (A) ganz abschrauben (gegen Uhrzeigersinn) und über das Innenrohr der UAG herunterschieben.
	Den Druckknopf (B) ganz eindrücken und das Innenrohr (C) der UAG ganz herausziehen.
	Den Gehstützenständer über das Außenrohr der UAG bis zum Anschlag nach oben schieben. Der Hebel des Gehstützenständers sollte mit dem Handgriff der UAG in einer Linie stehen.
	Das Innenrohr wieder Einschieben und den Druckknopf in die gewählte Einstellhöhe (Lochung) einrasten lassen. Die Quetschverschraubung (im Uhrzeigersinn) wieder fest anziehen. Den Spreizhalter (D) bis kurz oberhalb des Druckknopfes schieben und die Schraube mit einem Inbus-Schlüssel / SW 4 (nicht im Lieferumfang enthalten) fest anziehen.

Abbildungen	Bedienung
	Bild 1 Um den Gehstützenständer zu spreizen, halten Sie die UAG mit einer Hand am Handgriff fest und drücken mit der anderen Hand den Hebel bis zum Anschlag ganz nach unten.  Achten Sie beim Abstellen auf die Bodenbeschaffenheit, um ein Wegrutschen der UAG zu verhindern. Den Gehstützenständer immer bis zum Anschlag herunterdrücken damit die Standsicherheit der UAG gewährleistet ist. Bild 2 Zur Wiederverwendung der UAG halten Sie die UAG am Handgriff fest und ziehen mit der anderen Hand den Hebel bis zum Anschlag ganz nach oben.
	Sicherheitshinweise beachten! Bild 1: Gebrauchsstellung-Ständer Zeigt die UAG mit vollgespreiztem Gehstützenständer. Bild 2: Benutzerstellung-UAG Zeigt die UAG mit voll eingezogenem Gehstützenständer. Produktangaben Gewicht: 95 g Spreizmaß: 230 mm Material: Kunststoffe und Federdraht

Pflegehinweise

Zur Pflege verwenden Sie ein mildes handelsübliches Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel. Nach dem Reinigen wischen Sie mit klarem Wasser nach und reiben den Gehstützenständer mit einem Tuch trocken.

Gewährleistung

Auf den Gehstützenständer geben wir eine **Garantie von 24 Monaten**. Hiervon sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Produktes.



Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie nach der Montage und vor Gebrauch die einwandfreie Funktion des Gehstützenständers.
- Den Gehstützenständer nur aus ebenem Untergrund verwenden; sonst besteht Kippgefahr für die UAG.
- Keine eigenmächtigen mechanischen Veränderungen an dem Gehstützenständer vornehmen.
- Ein defekter bzw. fehlerhafter Gehstützenständer ist zu ersetzen.
- Vor Benutzung der UAG ist der Gehstützenständer wieder vollständig bis zum Anschlag hochzuschieben.