



tegen infecties moet nageleefd worden. Neem de markeringen op de verpakkingsmaterialen in acht en handel ernaar.

Bedieningshandleiding

Okselkrukken

1. Artikelbeschrijving

1.1. Inleiding

- Bij het hier beschreven artikel gaat het, conform (EU) 2017/745 RMH, om een medisch hulpmiddel van risicoklasse I.
- In deze bedieningshandleiding vindt u informatie en instructies bij de ingebruikneming, het gebruik, het onderhoud en de verzorging van het artikel. Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door alvorens het artikel te gebruiken. Neem de veiligheidsinstructies in acht en handel ernaar.

2. Prestatiekenmerken

2.1. Doelomschrijving

- Het product dient voor verlichting van de belasting bij beperkingen van de onderste extremiteiten, bij gelijktijdige beperkingen van de bovenste extremiteiten. Voor het veilige gebruik moet een toereikend spierstelsel in de arm en hand beschikbaar zijn. Het stelt de gebruiker in staat, naar wens mobieler te worden. Mensen met verstoorde zintuiglijke verwerking kunnen dit artikel mogelijkwijze niet gebruiken. Het artikel stelt geen bijzondere eisen aan het intellect van de gebruiker.

Specificatie:

REF	Benaming				
126.10...	Quick'N Easy Soft, kinderen	130 kg	c	b	a
126.20...	Quick'N Easy Soft, jongeren en dames	130 kg	c	b	a
126.30.10	Quick'N Easy Soft, standaard	130 kg	c	b	a
126.40.10	Quick'N Easy Soft, extra lengte	130 kg	c	b	a
127.10...	Quick'N Easy kinderen	130 kg	c	b	a
127.20...	Quick'N Easy jongeren en dames	130 kg	c	b	a
127.30.10	Quick'N Easy standaard	130 kg	c	b	a
127.40.10	Quick'N Easy extra lengte	130 kg	c	b	a
128.10	Big 200	200 kg	c	b	-
129.00	Big 160	160 kg	c	b	-

a=In de hoogte verstelbaar middels verstellingsclip/ b=Greep in de hoogte verstelbaar

c=Gebruik binnen- en buitenshuis

2.2. Gebruik

- Temperatuurbereik: -10 °C tot +35 °C. Rechtstreekse warmtestraling op het artikel moet voorkomen worden. Luchtvochtigheid: 40% tot 85%. Buiten deze omstandigheden kan het artikel slechts kortstondig gebruikt worden.
- Het artikel kan niet in een zwembad of sauna gebruikt worden, aangezien oppervlakteverkleuringen en beperkingen van de mechanische stevigheid kunnen ontstaan.

2.3. Opslag en transport

- Temperatuurbereik: +5 °C tot +25 °C. Rechtstreekse warmtestraling op het artikel moet voorkomen worden. Het artikel in droge ruimten bij een luchtvochtigheid tot 65% opslaan.

2.4. Afvoer

- De afvoer en recycling van gebruikte producten en verpakkingen moeten overeenkomstig de geldende voorschriften plaatsvinden. Doe navraag bij een afvalverwerkend bedrijf. De wet op de bescherming

3. Symbolen en typeplaatjes

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Handleiding lezen!		Bouwjaar product
	Artikelnummer		Maximaal gebruikersgewicht in kg
	Taal		Product voldoet aan EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
	Belangrijke informatie!		

4. Garantie

- Het artikel heeft een fabrikantgarantie van 12 maanden. De voorwaarden zijn de Algemene voorwaarden (www.rebotec.de/agbs) en het beoogde gebruik. De wettelijke garantie bepalingen zijn van kracht.
- Eigenmachtig uitgevoerde wijzigingen aan dit artikel leiden tot het vervallen van de productconformiteit en van de garantie.

4.1. Reclamatie

- Gelieve vóór een retourzending contact met ons op te nemen. Om transportschade te verminderen, gebruikt u zoveel mogelijk de originele verpakking.
- De wet op de bescherming tegen infectie moet nageleefd worden.
 - Vergewis u ervan dat bij retourzending geen infectiegevaar meer van het artikel uitgaat. Markeer het artikel met een infoblad inzake ongevaarlijkheid. Voor retourzendingen die niet als ongevaarlijk gemarkeerd zijn, worden evt. kosten aangerekend.

5. Veiligheidsinstructies



De volgende veiligheidsinstructies in acht nemen:

- Vóór de eerste ingebruikneming moet de bedieningshandleiding volledig gelezen worden om schade door verkeerde bediening of gevaren te voorkomen. Vóór iedere ingebruikneming controleert u of het artikel herkenbare schade vertoont. Bij functiestoringen of beschadigingen van welke aard dan ook mag het artikel niet gebruikt worden. Controleer regelmatig de zuignap op beschadigingen en slijtage; eventueel vernieuwen.
- Bij het lopen moet de kruk zo verticaal mogelijk gezet worden. Zet de kruk zodoende nooit te ver van het lichaam af of naar voren in de looprichting. Neem de handgreep met één hand volledig en stevig beet. Laat u zo mogelijk door een helper begeleiden en ondersteunen, opdat deze u bij een eventuele val kan opvangen.
- De kruk mag geenszins voor niet beoogde doelen gebruikt worden. Gebruik haar dus uitsluitend ter ondersteuning van het loopvermogen en niet bv. als hulp om op te staan, als hefboom, voor het verplaatsen van meubelen en andere voorwerpen. Geen voorwerpen (tassen, zakken enz.) aan de kruk hangen.
- Na langdurig niet gebruiken: kruk door vakpersoneel of de vakhandel laten controleren. Er mogen geen eigenmachtige mechanische veranderingen uitgevoerd worden (productaansprakelijkheid!). De kruk niet langdurig aan zonnestrallen blootstellen (aan het raam, de radiator, in de auto). Hitte kan tot veranderingen in de materiaaleigenschappen en de houdbaarheid leiden.
- Opgelet, slipgevaar:** loop met de kruk nooit zonder antislipmiddel (ijsklaus) over een met sneeuw of ijs bedekte ondergrond. Voorzichtig



bij vochtige tegels of vloeren of het lopen over losse tapijtvloeren. Grepen of zuignappen nooit met oliehoudende substanties reinigen. Voorzichtig bij oneffenheden, gaten in de vloer en losse ondergrond, aangezien de kruk daarbij onverwachts kan wegglijden of wegzinken.

- Bij oppervlaktetemperaturen > 40 °C bestaat gevaar voor verwondingen. Stel het artikel niet bloot aan een te hoge temperatuur (zonlicht, verwarming, heet water). Artikel vóór gebruik laten afkoelen.

i Bij gebruik van het artikel door een gebruiker met ongevoelige huid (geen temperatuurwaarneming of beschadigde huid) moet door het verplegingspersoneel een warmtecontrole (bv. aanraking met de handrug) uitgevoerd worden.

6. Melding van incidenten

- Ernstige incidenten in verband met het artikel moeten onverwijld aan de fabrikant (pms@rebotec.de) en het Duitse Instituut voor geneesmiddelen en medische producten (BfArM, www.bfarm.de/DE) gemeld worden. Gebruik de BfArM-meldfuncties en formulieren.

7. Hergebruik, levensduur


- Het artikel is geschikt voor hergebruik. Het aantal hergebruiken is afhankelijk van de gebruiksintensiteit en gebruikswijze van het artikel. Vóór het hergebruik moet het artikel voorbereid worden en moet de technische, functionele veiligheid van het artikel gecontroleerd en evt. hersteld worden. Voor verdere informatie raadpleegt u de voorbereidingshandleiding (06.12.154). De voorbereidingshandleiding en deze bedieningshandleiding kunnen op www.rebotec.de/downloads gedownload worden.
- Bij beoogd gebruik bedraagt de productlevensduur 2 jaar. De daadwerkelijke levensduur kan naargelang de intensiteit van het gebruik en de algemene toestand variëren.

8. Gebruikstoestand bewerkstelligen

- Het artikel werd in de fabriek op feilloosheid en volledigheid gecontroleerd. Controleer het artikel na ontvangst op eventuele transportschade en op volledigheid van de leveringsomvang.

8.1. Hoogteverstelling van de okselkrukken


- Okselhoogte instellen:** om de individuele greep- en okselhoogte (C) in te stellen, verwijdert u de beide rode clips (A–B) door aan weerszijden op de lippen van de clips (D) te drukken.
- Okselkussen instellen:** stel eerst de benodigde hoogte van het okselkussen in (F–F). Let er hierbij op dat de boorgaten in de aluminiumbuizen elkaar overlappen.
- Handopname instellen:** vervolgens stelt u de individuele hoogte van de handopname (C–C) in. Let er hierbij op dat de boorgaten in de zone (A–B) elkaar overlappen. Let er eveneens op dat de geleiding van de greep boven- en onderaan telkens één boorgat bedekt (E).
- Opmerking:** bij grote instellingen van de hoogte van het okselkussen moet de rode binnenste buisstop (G), die in de boorgaten zichtbaar is, zich ten minste één boorgat lager bevinden dan de clips (A–B). Nu drukt u de rode clips (H) in hun eindpositie.

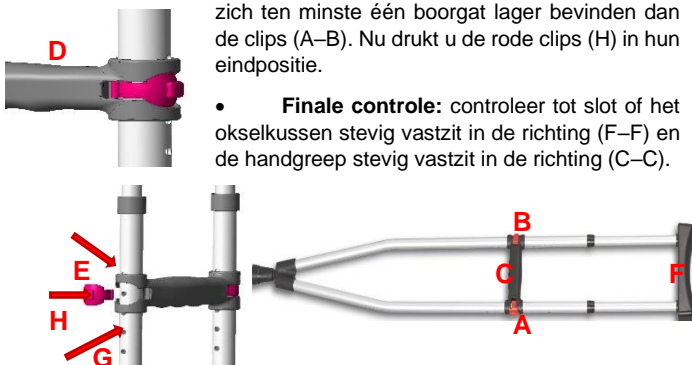

- Finale controle:** controleer tot slot of het okselkussen stevig vastzit in de richting (F–F) en de handgreep stevig vastzit in de richting (C–C).

8.2. Hoogteverstelling van de BIG-oxselkruk


- Okselhoogte instellen:** met een steeksleutel SW 13 de dopmoeren (A) aan één kant losdraaien en de schroefdraadbouten eruit trekken. De onderste buis overeenkomstig de gewenste okselhoogte verschuiven. Hierbij op de vergrendelingspunten van de boorgaten letten. De schroefdraadbouten erdoorheen steken en de dopmoeren (H) weer stevig aanspannen.
- Greephoogte instellen:** met een steeksleutel SW 13 de dopmoer (B) aan één kant losdraaien en de schroefdraadbout eruit trekken. De anatomische greep (op linker en rechter uitvoering letten) op de gewenste afstand brengen (op boorpatroon letten). De schroefdraadbout erdoorheen steken en de dopmoer (B) weer stevig aanspannen.

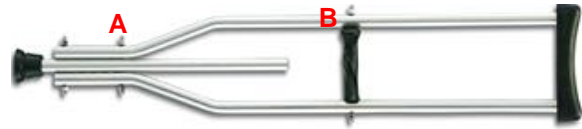

9. Productgegevens

- Wijzigingen door toedoen van technische verdere ontwikkelingen ten opzichte van de in deze bedieningshandleiding weergegeven uitvoering behouden wij ons voor.

REF	a1/ mm	a2/ mm	b1/ mm	b2/ mm	c/ mm
126.10...	480	710	830	1030	22
126.20...	580	810	1000	1200	22
126.30.10	680	910	1180	1380	22
126.40.10	760	980	1360	1560	22
127.10...	480	710	830	1030	22
127.20...	580	810	1000	1200	22
127.30.10	680	910	1180	1380	22
127.40.10	760	980	1360	1560	22
128.10	650	830	1180	1500	22-24
129.00	650	830	1180	1500	22-24

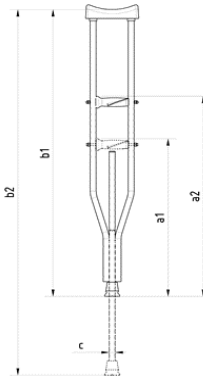

a=Greephoogte, b=Okselhoogte c=Grootte zuignap

10. Verzorging

- Gebruik voor de verzorging een mild, gangbaar reinigings- en ontsmettingsmiddel. Na het reinigen wrijft u af met helder water en droogt u de kruk met een doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen met agressieve oplossingsadditieven (productinstructies in acht nemen!) of harde reinigingsvoorwerpen, aangezien hierdoor de oppervlakken beschadigd kunnen worden of zich afzettingen kunnen vormen.

11. Onderhoud

- Laat uw kruk ieder halfjaar ten minste 1x door uw vakhandelaar controleren. Versleten zuignappen (slijtageonderdeel) moeten onverwijld vervangen worden. Op de diameter letten (zie 9). Trek de zuignap van het uiteinde van de buis af. Nieuwe zuignap tot aan de aanslag erop drukken en controleren of ze goed vastzit.

Vervangingsonderdelen en toebehoren:

Art.-nr.	Benaming
200...20	Zuignap 22 mm
201.30.26	Verstellingsclip 22 mm
202.85.00	Geleidebus 22 mm
06.02.005	Bedieningshandleiding
06.12.154	Vorbereidingshandleiding
160.00.101	Greepkussen Mini
160.00.102	Greepkussen standaard
160.00.103	Greepkussen Big
168.10.22	Big Foot (antislipbuffer)