

Istruzioni per l'uso

Bastoni da passeggio

1. Descrizione dell'articolo

1.1. Introduzione

- Secondo (UE) 2017/745 MDR, l'articolo qui descritto è un prodotto medico della classe di rischio I.
- Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni e note relative alla messa in funzione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla cura dell'articolo. Prima di utilizzare l'articolo, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Osservare le avvertenze per la sicurezza e agire in base ad esse.

2. Caratteristiche prestazionali

2.1. Destinazione d'uso

- Il prodotto serve come leggero sostegno in caso di invalidità delle estremità inferiori.
- Consente all'utente di muoversi come desidera. Per l'utilizzo sicuro, la muscolatura deve essere sufficientemente sviluppata. Persone affette da disturbi sensoriali potrebbero non essere in grado di utilizzare questo articolo. L'articolo non impone particolari requisiti di formazione dell'utente.

Specifiche:

| REF | Denominazione | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------|---|---|--|
| 133... | Simplex | 3 | 125 kg | c | a | |
| 136... | Handy, sinistra | 3 | 125 kg | c | a | |
| 138... | Handy, destra | 3 | 125 kg | c | a | |
| 142... | Anatom, sinistra | 3 | 125 kg | c | a | |
| 144... | Anatom, destra | 3 | 125 kg | c | a | |
| 146... | Bastone Fischer, sinistra | 3 | 125 kg | c | a | |
| 147... | Bastone Fischer, sinistra | - | 125 kg | c | b | |
| 148... | Bastone Fischer, destra | 3 | 125 kg | c | a | |
| 149... | Bastone Fischer, destra | - | 125 kg | c | b | |
| 133.22.15 | Simplex 150 | 3 | 150 kg | c | a | |
| 133.22.16 | Simplex 150 sovralonghezza | 3 | 150 kg | c | a | |
| 133.22.17 | Simplex 175 | 3 | 175 kg | c | a | |
| 142.22.15 | Anatom 150, sinistra | 3 | 150 kg | c | a | |
| 144.22.15 | Anatom 150, destra | 3 | 150 kg | c | a | |
| 142.22.16 | Anatom 150 sovralonghezza, sinistra | 3 | 150 kg | c | a | |
| 144.22.16 | Anatom 150 sovralonghezza, destra | 3 | 150 kg | c | a | |
| 142.22.17 | Anatom 175, sinistra | 3 | 175 kg | c | a | |
| 144.22.17 | Anatom 175, destra | 3 | 175 kg | c | a | |
| 121.20.10 | Hemi, piccolo, sinistra | 3 | 100 kg | c | a | |
| 121.20.20 | Hemi, piccolo, destra | 3 | 100 kg | c | a | |
| 121.10.10 | Hemi, grande, sinistra | 3 | 100 kg | c | a | |
| 121.10.20 | Hemi, grande, destra | 3 | 100 kg | c | a | |

a=Regolabile in altezza / b=Tubo continuo, accorciabile
 c=Impiego in ambienti interni ed esterni
 1=Clip standard / 2=Pressione di compressione / 3=Clip di compressione
 4=Pressione standard

2.2. Impiego

- Intervallo di temperatura: da -10°C a +35°C Evitare un irraggiamento termico diretto sull'articolo. Umidità dell'aria: da 40% a 85%. Oltre queste condizioni l'articolo può essere utilizzato solo per poco tempo.

- L'articolo non può essere utilizzato in piscina o in una sauna, in quanto possono manifestarsi alterazioni del colore della superficie e limitazioni della resistenza meccanica.

2.3. Stoccaggio e trasporto

- Intervallo di temperatura: da 5 °C a + 25 °C Evitare un irraggiamento termico diretto sull'articolo. Conservare l'articolo in un ambiente asciutto con un'umidità atmosferica fino al 65%.

2.4. Smaltimento

- Lo smaltimento e il riciclaggio di prodotti e imballaggi usati devono essere effettuati conformemente alle norme vigenti. Informarsi presso un'azienda di smaltimento rifiuti. Rispettare la Legge sulla protezione dalle infezioni. Osservare i contrassegni sui materiali dell'imballaggio e agire in base ad essi.

3. Simboli e targhette identificative

| Simbolo | Significato | Simbolo | Significato |
|---------|--------------------------|---------|---|
| | Leggere le istruzioni! | | Anno di costruzione del prodotto |
| | Codice articolo | | Produttore |
| | Lingua | | Peso massimo dell'utente in kg |
| | Informazione importante! | | Il prodotto è conforme alla (UE) 2017/745 MDR |

4. Garanzia

- L'articolo ha una garanzia del produttore di 12 mesi. Il presupposto è rappresentato dalle CGC generali (www.rebotec.de/agbs) e dall'uso conforme. Hanno validità le disposizioni legali in materia di garanzia.
- Eventuali modifiche apportate arbitrariamente a questo articolo comportano l'estinzione della conformità del prodotto e la perdita della garanzia.

4.1. Reclamo

- Prima di una restituzione si prega di contattarci. Per ridurre i danni da trasporto, utilizzare possibilmente l'imballaggio originale.
- Rispettare la Legge sulla protezione dalle infezioni.
 - Accertarsi che, in caso di restituzione, l'articolo non comporti alcun pericolo di infezione. Contrassegnare l'articolo con un opuscolo sulla sicurezza. Eventuali restituzioni non contrassegnate come sicure potrebbero comportare costi aggiuntivi.

5. Avvertenze per la sicurezza



Osservare le seguenti avvertenze per la sicurezza:

- Prima della prima messa in funzione, leggere integralmente le istruzioni per l'uso per evitare danni dovuti a uso improprio o pericoli. Prima di ogni messa in funzione, verificare se l'articolo presenti danni visibili. In caso di anomalie funzionali o danni di qualsiasi tipo, l'articolo non deve essere utilizzato. Verificare regolarmente l'eventuale danneggiamento e usura della capsula di aspirazione; se necessario, sostituire.
- Durante la deambulazione, l'ausilio per la deambulazione deve essere posto il più possibile in posizione verticale. Non porre quindi mai l'ausilio per la deambulazione eccessivamente lontano dal corpo o in avanti nella direzione in cui si cammina. Abbracciare completamente e saldamente l'impugnatura con una mano. Se necessario, farsi accompagnare e sorreggere da una persona che possa afferrarvi in caso di eventuale caduta.





- L'ausilio per la deambulazione non deve assolutamente essere utilizzato per uno scopo diverso da quello previsto. Pertanto, utilizzarlo soltanto come sostegno della capacità deambulatoria e non ad es. come ausilio per alzarsi, per sollevare, per spostare mobili e altri oggetti. Non appendere oggetti (borsa, busta, ecc.) all'ausilio per la deambulazione.
- Successivamente a inutilizzo per un periodo prolungato: Far controllare l'ausilio per la deambulazione da un personale e/o rivenditore specializzato. Non devono essere effettuate modifiche meccaniche di propria iniziativa (responsabilità per danno da prodotti difettosi!). Non esporre l'ausilio per la deambulazione alla radiazione solare per un periodo di tempo prolungato (alla finestra, al radiatore, nella macchina). Il caldo può provocare alterazioni delle proprietà del materiale e della conservabilità.
- **Attenzione, pericolo di scivolamento:** Non andare mai con l'ausilio per la deambulazione su fondo innevato o ghiacciato senza una protezione antiscivolo (artiglio da ghiaccio). Attenzione in caso di piastrelle, pavimenti umidi o di attraversamento di moquette sfuse. Non pulire mai le impugnature o le capsule di aspirazione con sostanze oleose. Attenzione in caso di asperità, buchi nel suolo e fondo sfuso, in quanto in tal caso l'ausilio per la deambulazione può scivolare o sprofondare all'improvviso.
- Con temperature superficiali > 40°C sussiste pericolo di lesioni. Non esporre l'articolo a temperature eccessivamente alte (radiazione solare, radiatore, acqua calda). Prima dell'utilizzo, far raffreddare l'articolo.



Se l'articolo viene utilizzato da un utente con una pelle poco sensibile (nessuna percezione della temperatura o danni cutanei), il personale sanitario deve eseguire un controllo termico (ad es. contatto con il palmo della mano).

6. Notifica di incidenti

- Eventuali incidenti gravi legati all'articolo devono essere segnalati immediatamente al produttore (pms@rebotec.de) e al BfArM (Istituto federale per i Prodotti Farmaceutici e Medicinali) (www.bfarm.de/DE). Utilizzare le funzioni di notifica del BfArM e i moduli.

7. Riutilizzo, durata

- L'articolo è adatto al riutilizzo. La quantità di riutilizzi dipende dall'intensità e dal modo di utilizzo dell'articolo. Prima del riutilizzo, l'articolo deve essere preparato ed è necessario verificare ed eventualmente ripristinare la sicurezza tecnica, funzionale dell'articolo. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle istruzioni per la preparazione (04.12.154). Le istruzioni per la preparazione e le presenti istruzioni per l'uso possono essere scaricate sul sito www.rebotec.de/downloads.
- In caso di uso conforme, la durata del prodotto è di 2 anni. La durata effettiva può variare in base all'intensità dell'uso e allo stato generale.

8. Stabilire le condizioni d'uso

- In fabbrica l'articolo è stato controllato per verificare l'assenza di errori e la completezza. Dopo la ricezione, controllare l'articolo per escludere eventuali danni da trasporto e per accertare la completezza del volume della fornitura.

8.1. Adattamento alla statura

- Far adattare l'articolo alla propria statura dal proprio personale specializzato responsabile.

- L'altezza viene regolata mediante un tubo in alluminio telescopizzabile con Clip (2). Il raccordo a vite, prima della regolazione deve essere allentato mediante rotazione a sinistra. Dopo la regolazione, è necessario serrare nuovamente il raccordo a vite.




- Gli articoli con tubo continuo devono essere tagliati su misura.

9. Dati del prodotto

- Ci riserviamo di apportare modifiche dovute a sviluppi tecnici rispetto al modello raffigurato nelle presenti istruzioni per l'uso.

| REF | b / mm | a / mm |
|-----------|-------------|--------|
| 133... | 730-955 | 17 |
| 136... | 710-935 | 17 |
| 138... | 710-935 | 17 |
| 142... | 720-945 | 17 |
| 144... | 720-945 | 17 |
| 146... | 700-925 | 17 |
| 147... | fino a 1055 | 22 |
| 148... | 700-925 | 17 |
| 149... | fino a 1055 | 22 |
| 133.22.15 | 745-970 | 19 |
| 133.22.16 | 845-1070 | 19 |
| 133.22.17 | 745-970 | 19 |
| 142.22.15 | 740-965 | 19 |
| 144.22.15 | 740-965 | 19 |
| 142.22.16 | 840-1065 | 19 |
| 144.22.16 | 840-1065 | 19 |
| 142.22.17 | 740-965 | 19 |
| 144.22.17 | 740-965 | 19 |
| 121.20.10 | 1210-1610 | 19 |
| 121.20.20 | 1210-1610 | 19 |
| 121.10.10 | 1460-1880 | 19 |
| 121.10.20 | 1460-1880 | 19 |

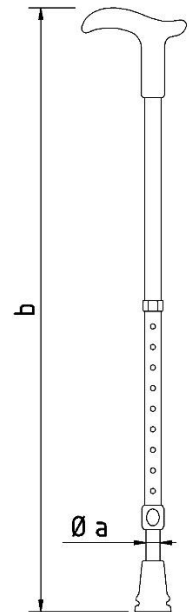

10. Pulizia

- Per la cura utilizzare un detergente e un disinfettante comune leggero. Dopo la pulizia, pulire con acqua pulita e asciugare l'articolo strofinandoci sopra un panno. Non utilizzare abrasivi o detersivi con additivi aggressivi (osservare le note sul prodotto!) e oggetti per la pulizia duri in quanto altrimenti la superficie può risultare danneggiata oppure possono formarsi dei depositi.

11. Manutenzione

- Far controllare l'ausilio per la deambulazione dal proprio rivenditore specializzato almeno 1 volta ogni sei mesi. Eventuali capsule di aspirazione usurate (parte soggetta a usura) devono essere immediatamente sostituite. Fare attenzione al diametro (vedere 9) Rimuovere la capsula di aspirazione dall'estremità del tubo. Spingere la nuova capsula di aspirazione fino alla battuta di arresto e verificarne il fissaggio in sede.

Pezzi di ricambio e accessori:

| Cod. art. | Denominazione |
|-----------|--------------------------------|
| 200...10 | Capsula di aspirazione 17mm |
| 200...00 | Capsula di aspirazione 19mm |
| 200...20 | Capsula di aspirazione 22mm |
| 201...00 | Clip di regolazione 22mm |
| 201...20 | Clip di regolazione 20mm |
| 04.03.006 | Istruzioni per l'uso |
| 04.12.154 | Istruzioni per la preparazione |