



Bedieningshandleiding Wandelstokken

1. Artikelbeschrijving

1.1. Inleiding

- Bij het hier beschreven artikel gaat het, conform (EU) 2017/745 RMH, om een medisch hulpmiddel van risicoklasse I.
- In deze bedieningshandleiding vindt u informatie en instructies bij de ingebruikneming, het gebruik, het onderhoud en de verzorging van het artikel. Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door alvorens het artikel te gebruiken. Neem de veiligheidsinstructies in acht en handel ernaar.

2. Prestatiekenmerken

2.1. Doelomschrijving

- Het product dient voor lichte ondersteuning bij beperkingen van de onderste extremiteiten.
- Het stelt de gebruiker in staat, naar wens mobieler te worden. Voor het veilige gebruik moet een toereikend spierstelsel beschikbaar zijn. Mensen met verstoorde zintuiglijke verwerking kunnen dit artikel mogelijkwijze niet gebruiken. Het artikel stelt geen bijzondere eisen aan het intellect van de gebruiker.

Specificatie:

REF	Benaming					
133...	Simplex	3	125 kg	c	a	
136...	Handy, links	3	125 kg	c	a	
138...	Handy, rechts	3	125 kg	c	a	
142...	Anatoon, links	3	125 kg	c	a	
144...	Anatoon, rechts	3	125 kg	c	a	
146...	Visserstok, links	3	125 kg	c	a	
147...	Visserstok, links	-	125 kg	c	b	
148...	Visserstok, rechts	3	125 kg	c	a	
149...	Visserstok, rechts	-	125 kg	c	b	
133.22.15	Simplex 150	3	150 kg	c	a	
133.22.16	Simplex 150 extra lang	3	150 kg	c	a	
133.22.17	Simplex 175	3	175 kg	c	a	
142.22.15	Anatoon 150, links	3	150 kg	c	a	
144.22.15	Anatoon 150, rechts	3	150 kg	c	a	
142.22.16	Anatoon 150 extra lang, links	3	150 kg	c	a	
144.22.16	Anatoon 150 extra lang, rechts	3	150 kg	c	a	
142.22.17	Anatoon 175, links	3	175 kg	c	a	
144.22.17	Anatoon 175, rechts	3	175 kg	c	a	
121.20.10	Hemi, klein, links	3	100 kg	c	a	
121.20.20	Hemi, klein, rechts	3	100 kg	c	a	
121.10.10	Hemi, groot, links	3	100 kg	c	a	
121.10.20	Hemi, groot, rechts	3	100 kg	c	a	

a=In de hoogte verstelbaar / b=doorlopende buis, inkortbaar
 c=Gebruik binnen- en buitenshuis
 1=Standaardclip / 2=Klemdruk / 3=Klemclip
 4=Standaarddruk

2.2. Gebruik

- Temperatuurbereik: -10 °C tot +35 °C. Rechtstreekse warmtestraling op het artikel moet voorkomen worden. Luchtvochtigheid: 40% tot 85%. Buiten deze omstandigheden kan het artikel slechts kortstondig gebruikt worden.
- Het artikel kan niet in een zwembad of sauna gebruikt worden, aangezien oppervlakteverkleuringen en beperkingen van de mechanische stevigheid kunnen ontstaan.

2.3. Opslag en transport

- Temperatuurbereik: +5 °C tot +25 °C. Rechtstreekse warmtestraling op het artikel moet voorkomen worden. Het artikel in droge ruimten bij een luchtvochtigheid tot 65% opslaan.

2.4. Afvoer

- De afvoer en recycling van gebruikte producten en verpakkingen moeten overeenkomstig de geldende voorschriften plaatsvinden. Doe navraag bij een afvalverwerkend bedrijf. De wet op de bescherming tegen infecties moet nageleefd worden. Neem de markeringen op de verpakkingsmaterialen in acht en handel ernaar.

3. Symbolen en typeplaatjes

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Handleiding lezen!		Bouwjaar product
	Artikelnummer		Fabrikant
	Taal		Maximaal gebruikersgewicht in kg
	Belangrijke informatie!		Product voldoet aan EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

4. Garantie

- Het artikel heeft een fabrieksgarantie van 12 maanden. De voorwaarden zijn de Algemene voorwaarden (www.rebotec.de/agbs) en het beoogde gebruik. De wettelijke garantiebepalingen zijn van kracht.
- Eigenmachtig uitgevoerde wijzigingen aan dit artikel leiden tot het vervallen van de productconformiteit en van de garantie.

4.1. Reclamatie

- Gelieve vóór een retourzending contact met ons op te nemen. Om transportschade te verminderen, gebruikt u zoveel mogelijk de originele verpakking.
- De wet op de bescherming tegen infectie moet nageleefd worden.
 - Vergewis u ervan dat bij retourzending geen infectiegevaar meer van het artikel uitgaat. Markeer het artikel met een infoblad inzake ongevaarlijkheid. Voor retourzendingen die niet als ongevaarlijk gemarkeerd zijn, worden evt. kosten aangerekend.

5. Veiligheidsinstructies



De volgende veiligheidsinstructies in acht nemen:

- Vóór de eerste ingebruikneming moet de bedieningshandleiding volledig gelezen worden om schade door verkeerde bediening of gevaren te voorkomen. Vóór iedere ingebruikneming controleert u of het artikel herkenbare schade vertoont. Bij functiestoringen of beschadigingen van welke aard dan ook mag het artikel niet gebruikt worden. Controleer regelmatig de zuignap op beschadigingen en slijtage; eventueel vernieuwen.
- Bij het lopen moet de kruk zo verticaal mogelijk gezet worden. Zet de kruk zodoende nooit te ver van het lichaam af of naar voren in de looprichting. Neem de handgreep met één hand volledig en vast beet. Laat u zo mogelijk door een helper begeleiden en ondersteunen, opdat deze u bij een eventuele val kan opvangen.
- De kruk mag geenszins voor onbeoogde doelen gebruikt worden. Gebruik haar dus uitsluitend ter ondersteuning van het





loopvermogen en niet bv. als hulp om op te staan, als hefboom, voor het verplaatsen van meubelen en andere voorwerpen. Geen voorwerpen (tassen, zakken enz.) aan de kruk hangen.

- Na langdurig niet gebruiken: kruk door vakpersoneel of de vakhandel laten controleren. Er mogen geen eigenmachtige mechanische veranderingen uitgevoerd worden (productaansprakelijkheid!). De kruk niet langdurig aan zonnestralen blootstellen (aan het raam, de radiator, in de auto). Hitte kan tot veranderingen in de materiaaleigenschappen en de houdbaarheid leiden.
- **Opgelet, slipgevaar:** loop met de kruk nooit zonder antislipmiddel (ijsklauw) over een met sneeuw of ijs bedekte ondergrond. Voorzichtig bij vochtige tegels of vloeren of het lopen over losse tapijtvloeren. Grepen of zuignappen nooit met oliehoudende substanties reinigen. Voorzichtig bij oneffenheden, gaten in de vloer en losse ondergrond, aangezien de kruk daarbij onverwachts kan wegglijden of wegzinken.
- Bij oppervlaktetemperaturen > 40 °C bestaat gevaar voor verwondingen. Stel het artikel niet bloot aan een te hoge temperatuur (zonlicht, verwarming, heet water). Artikel vóór gebruik laten afkoelen.



Bij gebruik van het artikel door een gebruiker met ongevoelige huid (geen temperatuurwaarneming of beschadigde huid) moet door het verplegingspersoneel een warmtecontrole (bv. aanraking met de handrug) uitgevoerd worden.

6. Melding van incidenten

- Ernstige incidenten in verband met het artikel moeten onverwijld aan de fabrikant (pms@rebotec.de) en het Duitse Instituut voor geneesmiddelen en medische producten (BfArM, www.bfarm.de/DE) gemeld worden. Gebruik de BfArM-meldfuncties en formulieren.

7. Hergebruik, levensduur

- Het artikel is geschikt voor hergebruik. Het aantal hergebruiken is afhankelijk van de gebruiksfrequentie en gebruikswijze van het artikel. Vóór het hergebruik moet het artikel voorbereid worden en moet de technische, functionele veiligheid van het artikel gecontroleerd en evt. hersteld worden. Voor verdere informatie raadpleegt u de voorbereidingshandleiding (06.12.154). De voorbereidingshandleiding en deze bedieningshandleiding kunnen op www.rebotec.de/downloads gedownload worden.
- Bij beoogd gebruik bedraagt de productlevensduur 2 jaar. De daadwerkelijke levensduur kan naargelang de intensiteit van het gebruik en de algemene toestand variëren.

8. Gebruikstoestand bewerkstelligen

- Het artikel werd in de fabriek op feilloosheid en volledigheid gecontroleerd. Controleer het artikel na ontvangst op eventuele transportschade en op volledigheid van de leveringsomvang.

8.1. Aanpassing aan lichaamsgrootte

- Laat het artikel door uw verantwoordelijk vakpersoneel aan uw lichaamsgrootte aanpassen.
- De hoogteverstelling geschiedt via een telescopische aluminiumbuis met clip (2). De schroefverbinding moet vóór het verstellen losgedraaid worden door linksom te draaien. Na het instellen moet de schroefbevestiging weer aangespannen worden.




- Artikelen met een doorlopende buis moeten passend toegesneden worden.

9. Productgegevens

- Wijzigingen door toedoen van technische verdere ontwikkelingen ten opzichte van de in deze bedieningshandleiding weergegeven uitvoering behouden wij ons voor.

REF	b / mm	a / mm
133...	730-955	17
136...	710-935	17
138...	710-935	17
142...	720-945	17
144...	720-945	17
146...	700-925	17
147...	tot 1055	22
148...	700-925	17
149...	tot 1055	22
133.22.15	745-970	19
133.22.16	845-1070	19
133.22.17	745-970	19
142.22.15	740-965	19
144.22.15	740-965	19
142.22.16	840-1065	19
144.22.16	840-1065	19
142.22.17	740-965	19
144.22.17	740-965	19
121.20.10	1210-1610	19
121.20.20	1210-1610	19
121.10.10	1460-1880	19
121.10.20	1460-1880	19

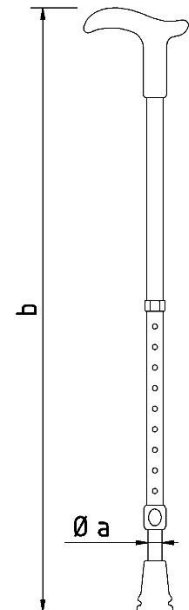

10. Verzorging

- Gebruik voor de verzorging een mild, gangbaar reinigings- en ontsmettingsmiddel. Na het reinigen wrijft u af met helder water en droogt u de kruk met een doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen met agressieve oplossingsadditieven (productinstructies in acht nemen!) of harde reinigingsvoorwerpen, aangezien hierdoor de oppervlakken beschadigd kunnen worden of zich afzettingen kunnen vormen.

11. Onderhoud

- Laat uw kruk ieder halfjaar ten minste 1x door uw vakhandelaar controleren. Versleten zuignappen (slijtageonderdeel) moeten onverwijld vervangen worden. Op de diameter letten (zie 9). Trek de zuignap van het uiteinde van de buis af. Nieuwe zuignap tot aan de aanslag erop drukken en controleren of ze goed vastzit.

Vervangingsonderdelen en toebehoren:

Art.-nr.	Benaming
200...10	Zuignap 17 mm
200...00	Zuignap 19 mm
200...20	Zuignap 22 mm
201...00	Verstellingsclip 22 mm
201...20	Verstellingsclip 20 mm
06.03.006	Bedieningshandleiding
06.12.154	Vorbereidingshandleiding